



## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**

### **TREKPLEISTER ECZEEMCRÈME**

#### **Toepassing**

Trekpleister eczeemcrème helpt bij de behandeling van diverse huidaandoeningen. Kan worden gebruikt bij een rode, gevoelige en/of schilferende huid, zoals bij eczeem en atopisch eczeem. Trekpleister eczeemcrème vermindert daarnaast de jeuk en brengt de geïrriteerde huid tot rust. Als u onzeker bent over de oorzaak van uw aandoening, raadpleeg dan uw (huis)arts.

De huidvriendelijke samenstelling bevat geen parfum en is ook geschikt voor de gevoelige en/of beschadigde huid.

#### **Werking**

Trekpleister eczeemcrème is een crème die haar werking ontleent aan een geleidelijke zuurstofafgifte en is corticosteroiden- en antibioticavrij. Deze continue zuurstofafgifte creëert een optimaal milieu voor de genezing van de huid.

Dermatologische testen hebben aangetoond dat het product effectief is.

Het huidvriendelijke en veilige werkingsprincipe van Trekpleister eczeemcrème is wereldwijd gepatenteerd. Het product is geregistreerd als medisch hulpmiddel.

#### **Gebruiksduur**

Neurodermitis-achtige huidaandoeningen zoals atopisch eczeem zijn vaak chronische huidziekten. Voor deze chronische aandoening zijn geen genezende therapieën bekend. Omdat Trekpleister eczeemcrème werkt op basis van geleidelijke zuurstofafgifte kan het product langdurig worden gebruikt. Trekpleister eczeemcrème bevat geen corticosteroiden of antibiotica.

#### **Aanwijzingen voor gebruik**

Minimaal twee maal per dag (meer malen naar behoefte) een dun laagje Trekpleister eczeemcrème aanbrengen op de aangedane huid. Voor gebruik op lange termijn wordt aangeraden Trekpleister eczeemcrème 2 tot 3 maal per dag aan te brengen.

#### **Bijwerking(en)**

Er zijn geen serieuze negatieve bijwerkingen geregistreerd. In een enkel geval kunnen de huidklachten aanvankelijk iets verergeren. Dit zal snel afnemen en hoeft geen reden te zijn om het gebruik van Trekpleister eczeemcrème te staken. Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen onverhoopt langdurig verergeren of binnen 21 dagen niet verbeteren.

Trekpleister eczeemcrème bevat geen corticosteroiden, antibiotica en parfums.

#### **Zwangerschap/borstvoeding**

Trekpleister eczeemcrème kan, voor zover bekend, in overeenstemming met de aanwijzingen, zonder gevaar voor de vrucht worden gebruikt tijdens de zwangerschap en/of borstvoedingsperiode. In het algemeen geldt dat men in het eerste trimester van de zwangerschap zo min mogelijk geneesmiddelen moet gebruiken. Trekpleister eczeemcrème is geen geneesmiddel. Desondanks wordt toch terughoudendheid met het gebruik gedurende deze periode aangeraden.

## Houdbaarheid

Bewaren bij kamertemperatuur. Uiterste gebruiksdatum: zie "exp" op onderzijde verpakking en tevens op de sluitnaad van de tube. Bewaar Trekpleister eczeemcrème buiten bereik van kleine kinderen. Uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.

**Deze gebruiksinformatie is voor het laatst herzien in mei 2017.**

 Ardoz Healthcare B.V.  
Kasteleinenkampweg 9-C  
5222 AX 's-Hertogenbosch NL

CE 0481

BIJ-28.254.v2